

Vanliga frågor

Kan jag använda min CPAP-apparat under flygresan?

Om du behöver använda din CPAP-apparat under flygresan måste du kontakta flygbolaget senast två veckor innan avresa för att få detta godkänt.

Om du har fått godkännandet i form av ett brev tar du med dig en kopia.

Kommer röntgenkamerorna i flygplatsens säkerhetskontroll att påverka min CPAP-apparat?

Nej, röntgenkamerorna kommer inte att skada din apparat. Dock kan säkerhetspersonalen kräva att se ett läkarintyg om att du behöver ha med dig medicinsk utrustning. Ha det därför i beredskap!

Kan jag använda min CPAP-apparat i andra länder?

Alla ResMeds CPAP-apparater har en strömförsörjningsenhet som automatiskt anpassar sig till de olika nättaggregat som finns i olika delar av världen. Alla apparater accepterar 100-240V, 50-60Hz, utan någon särskild justering.

Vänligen notera:

Även om en spänningsomvandlare kanske inte är nödvändig, måste du se till att du har rätt kontaktadapter för vägguttaget i landet du besöker.



ResMed

Tillbehör

ResMed Power Station II (RPS II)

Bekvämt och portabelt externt batteri för ResMeds CPAP-apparater.



	Art.nr
RPS II kit (inkluderar ett batteri, en väska, en nätadapter** och en användarmanual)	24923
Extra RPS II-batteri*	24926
RPS II dubbelkopplingskit*	24964
S9™ serien DC kabel	24961
Adapter S9-serien**	24946
Strömförsörjningsenhet S9-serien (90W)***	36823
Air10™ serien DC kabel	37343
Adapter Air10-serien**	37342
Strömförsörjningsenhet Air10-serien (90W)***	37346

* För att använda ett extra RPS II-batteri behöver du ett dubbelkopplingskit.

** Används för att koppla strömförsörjningsenheten till ResMed Power Station II

*** För andra apparater än S9/Air10-serien behöver du en strömförsörjningsenhet till RPS II.

ResMed 12/24V DC/DC omvandlare

DC-adaptorn tillåter samtliga apparater i Air10- och S9-serien samt H5i-befuktaren att strömförsörjas från en extern batterikälla (t.ex. i bilen eller båten).



	Art.nr
S9 serien DC/DC omvandlare 24V/90W	36970
Air10 serien DC/DC omvandlare 24V/90W	37297

Köp dina tillbehör i vår webshop!

mySleep.ResMed.com



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
Australia

Distribueras av: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard
San Diego CA 92123 USA. **ECIREP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park
Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Information om andra
ResMed kontor hittar du på www.resmed.com. © 2016 ResMed
Ltd. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
1019268 2016-01



ResMed



Sov gott på resande fot

ResMed.com



Resa på ett enkelt sätt

När sömnapnépatienter reser hemifrån har många svårt att bibehålla samma avkopplande sömn som de får hemma. Tidigare var sömnapnoiker som använde CPAP ofta tvungna att resa utan ordentlig behandling. Dessa dagar är nu ett minne blott!

CPAP-apparaten är nu fri från ditt sovrumms eluttag oavsett om du campar med din familj, sitter på ett flygplan, på ett tåg eller i en bil. Med ResMeds CPAP-resetillbehör kan du nu fortsätta din behandling och sova gott på din semester.

På resande fot

Att vara på resande fot är roligt och spännande. Med ResMeds DC-omvandlare och Power Station II kan du använda din CPAP nästan överallt. Med kombinationen av dessa två tekniker kan du använda din CPAP i din bil, lastbil, tält, båt eller fritidsfordon. Nu kan du njuta av samma avkopplande sömn på semestern som du får hemma.

I luften

Förr i tiden var sömnapnoiker ofta tvungna att flyga utan CPAP-behandling på natten.

ResMed Power Station II kan driva din CPAP i timmar i

luften. Dess låga vikt samt storleken gör det möjligt för dig att fortsätta din behandling var du än är och du kan komma till din destination med samma avkopplande nattsömn som du får hemma.

Resetips

- Använd alltid destillerat vatten, alternativt vatten på flaska, till din befuktare.
- Töm CPAP- befuktaren på vatten innan du åker till flygplatsen.
- Märk din reseväska som innehåller din CPAP-apparat med "medicinsk utrustning".
- Be att få ett intyg från din läkare som beskriver behovet av din CPAP-apparat.